

008SM0xx

Saliva Cup Mini

Kurzanleitung / Quick reference guide


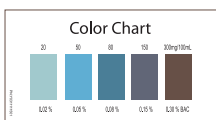


Abbildung ähnlich!
Reproduction may vary from original!


Alkoholtteststreifen bereits nach **2 Minuten** mit der beigefügten Color Chart abgleichen (Bitte Gebrauchsanweisung beachten)

Read Alcohol test strip at **2 minutes** - compare the reactive pad with the provided color chart.
(Read Instruction carefully)

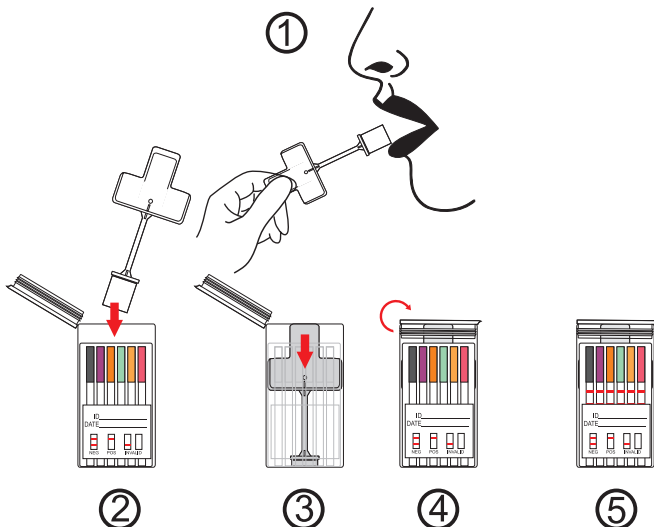

Drogenteststreifen: Ergebnisse nach **10 Minuten** auswerten
Nach **60 Minuten** keine Ergebnisse mehr auswerten.

Drug test strips: Read results at **10 minutes**
Do not interpret result after **60 minutes**.

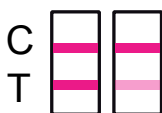

Negativ
Negative



Positiv
Positive



Ungültig
Invalid