


ulti med Streptococcus A Testkassette - Vergleich beflockter Tupfer mit Polyester Standardtupfern

Der neue beflockte Tupfer im ulti med Streptococcus A-Test bietet mehrere Vorteile:

- Senkrechtstehende Nylonfasern wirken wie eine weiche Bürste und ermöglichen so die bessere Aufnahme von Zellmaterial.
- Kapillarwirkung zwischen den Nylonfasern ermöglicht effizientere Flüssigkeitsaufnahme.
- Die Probe bleibt näher an der Tupferoberfläche und wird dadurch auch wieder besser an das Extraktionsmedium abgegeben.

Auf diese Weise verbessert der beflockte Tupfer die Empfindlichkeit des ulti med Streptococcus A-Tests.

Nachweis von Streptococcus A-Antigen*

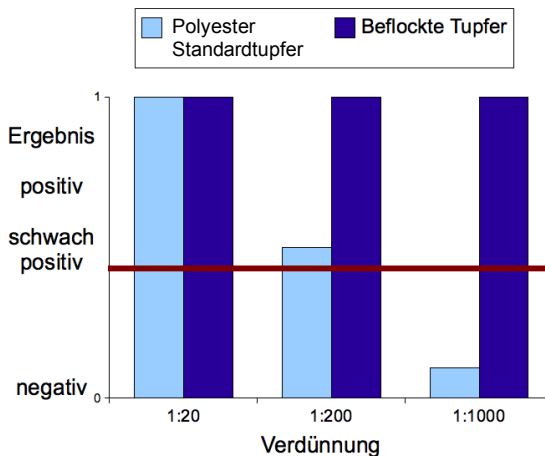

* Der Vergleich der Tupfer wurde mit dem ulti med Strep A-Test und Lösungen von Strep A-Antigen in unterschiedlichen Verdünnungen durchgeführt.